



# SARSコロナウイルス抗原キット ご使用方法

## ① 検体採取

綿棒を袋から取り出します。  
× 綿球を手で触らないようにしてください

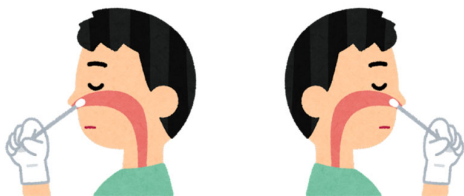


鼻の中2cmほど（綿球が鼻の中に隠れるくらい）挿入し、鼻腔壁に沿って綿棒を15秒程回転させます。同じ綿棒で両方の鼻から検体を採取します  
× 多量の出血や過度な鼻汁の付着は避けます

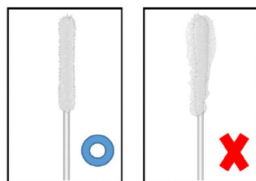

## ② 試料調製

抽出用バッファチューブの蓋シールを開け、(A) 検体採取した綿棒を入れ、10回以上もみほぐします

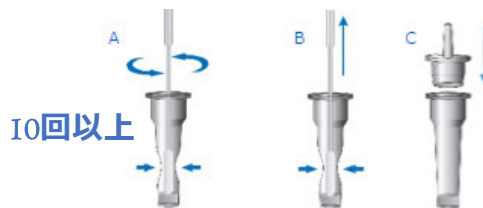

(B) 検体を絞りだすように、チューブから綿棒を引き抜きます  
(C) ノズルキャップをチューブに押し込み、しっかりと締めます

こちらで動画をご覧ください



# SARSコロナウイルス抗原キット ご使用方法

## ③ 検体滴下

テストデバイスの検体滴下孔（丸い穴）へ、チューブから検体を3滴垂らします。



C (コントロール) ライン:  
測定が正しく行われたことを示す  
T (テスト) ライン:  
コロナウイルス抗原が検出されたことを示す

○ 垂直・真上から滴下  
× 検体量が足りない  
泡になってしまっても、十分量滴下されれば検査可能です

検体滴下から、時間を測ります

## ④ 結果判定

検体滴下から15分後以降、30分以内の間はいつでも結果判定ができます




陽性



陰性



無効

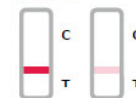

自主療養申請の際、検査結果の画像が必要となります。

Cラインが出ない場合、測定は無効

※自主療養申請の手続きに関する詳細は、裏面をご覧ください。

使用後は、ごみ袋に入れ、しばって封をした状態で、自治体のルールに従い廃棄して下さい